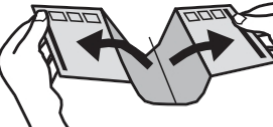
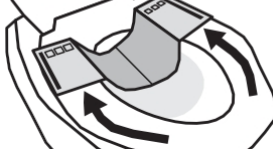
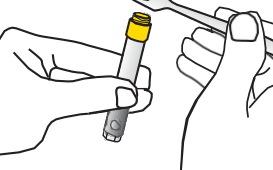
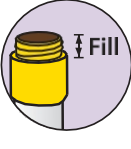


## Entnahme der Stuhlprobe mit dem OMNigene®-GUT-Gerät und dem Toilettenzubehör OM-AC1

Das Toilettenzubehör OM-AC1 wird zusammen mit dem OMNigene-GUT-Kit verwendet, um die Entnahme von Stuhlproben zu erleichtern.

**Lesen Sie vor der Entnahme alle Anweisungen durch.**

| Vorgehensweise:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>1. Für den Fall, dass Sie beim ersten Versuch keine Probe entnehmen können, werden zwei Toilettenaufsätze mitgeliefert.<br/> <b>Achtung:</b> Lassen Sie KEIN Toilettenwasser, Urin, Reinigungsmittel oder Duftstoffe mit dem Toilettenzubehör in Berührung kommen.</p>                                                                                                                   |
|    | <p>2. Entleeren Sie Ihre Blase, bevor Sie mit der Entnahme beginnen. Entnehmen Sie eine Stuhlprobe, die frei von Urin oder Toilettenwasser ist. Möglicherweise benötigen Sie Toilettenpapier oder Taschentücher.</p>                                                                                                                                                                        |
|   | <p>3. Ziehen Sie die Kante mit ▲ <b>vorsichtig</b> ab; wiederholen Sie dies für die Kante mit ■.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <p>4. Befestigen Sie die Klebefläche des Zubehörs an <b>der RÜCKSEITE des Toilettensitzes</b>, wobei die Klebefläche nahe am äußeren Rand des Sitzes liegen sollte, und drücken Sie sie fest an.</p>                                                                                                                                                                                        |
|  | <p>5. Halten Sie den gelben Schlauch fest und schrauben Sie NUR die violette Kappe ab und legen Sie sie für die spätere Verwendung beiseite.</p> <p><b>Wichtig:</b><br/>Entfernen Sie NICHT den gelben Schlauchverschluss.<br/>Verschütten Sie die stabilisierende Flüssigkeit im Röhrchen NICHT.</p>  |
|  | <p>6. Verwenden Sie den Spatel, um eine kleine Menge der Stuhlprobe aufzunehmen.</p>  <p>Tatsächliche Größe der Stuhlprobe.</p>                                                                                                                                                                         |
|  | <p>7. Geben Sie die Stuhlprobe in den oberen Teil des gelben Röhrchenverschlusses. Wiederholen Sie dies, bis der gelbe Röhrchenverschluss mit der Probe gefüllt ist.</p> <p><b>Wichtig:</b><br/>Drücken Sie die Probe NICHT in das Röhrchen.</p>                                                       |
|  | <p>8. Kratzen Sie horizontal über den Röhrendeckel, um die Probe zu glätten und überschüssiges Material zu entfernen.</p> <p>Wischen Sie die Außenseite des Röhrchens und den Deckel bei Bedarf mit Toilettenpapier oder einem Papiertuch ab.</p>                                                                                                                                           |

| Vorgehensweise (Fortsetzung):                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>9. Nehmen Sie die violette Kappe und schrauben Sie sie auf das gelbe Röhrende fest.</p>                                                                                                    |
|   | <p>10. Schütteln Sie das verschlossene Röhrchen <b>mindestens 30 Sekunden lang</b> so kräftig und schnell wie möglich hin und her.</p>                                                                                                                                           |
|   | <p>11. Die Stuhlprobe wird mit der Stabilisierungsflüssigkeit im Röhrchen vermischt; nicht alle Partikel lösen sich auf.</p> <p><b>Wichtig:</b><br/>Schütteln Sie weiter, wenn <b>große</b> Partikel zurückbleiben, wie in Abbildung A dargestellt.</p>                          |
|   | <p>12. Werfen Sie das gebrauchte Zubehör in die Toilette. Warten Sie 1 Minute, bis das Papier weich geworden ist, und spülen Sie dann. Alternativ können Sie es auch im Müll entsorgen.</p>                                                                                      |
|  | <p>13. Legen Sie die Spachtel in die Originalverpackung oder wickeln Sie sie in Toilettenpapier ein und entsorgen Sie sie im Müll.</p> <p><b>Wichtig:</b><br/>Senden Sie die Probe zur Verarbeitung gemäß den separat vom Kit-Anbieter mitgelieferten Lieferanweisungen ein.</p> |

- Gebührenfrei (Nordamerika): 1.866.813.6354, Option 6
- Alle anderen Länder: +1.613.723.5757, Option 6
- E-Mail: [support@dnagenotek.com](mailto:support@dnagenotek.com)

\*OMNigene ist eine eingetragene Marke von DNA Genotek Inc. Alle anderen hierin enthaltenen Marken und Namen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Protokolle, White Papers und Anwendungshinweise von DNA Genotek sind im Support-Bereich unserer Website unter [www.dnagenotek.com](http://www.dnagenotek.com) verfügbar.